

# EQA-program til kvalitetssikring af Blod i fæces – Program 4066 DK

## Prøvemateriale og sikkerhed

Der medsendes 4 hold á 4 stk. frosne prøver á 1 ml materiale til alle fire runder i 2023.  
Hver sæt er mærket med udsendelsesnummer og årstal og prøverne er mærket med et prøvenummer.

Alle prøverne består af fuldblod fortyndet i HEPESbuffer med albumin og 0,09 % natriumazid.  
Den anvendte natriumazid er fortyndet så meget at den ikke udgør nogen sikkerhedsrisiko.  
Prøverne skal håndteres med samme forholdsregler som patientprøver.

Prøvematerialet er specielt designet til anvendelse på instrumenterne OC Sensor Diana og OC Sensor Pledia, da matrix er den samme som bufferen i prøveopsamlingsglassene.

## Opbevaring og holdbarhed

Prøverne sendes frosne pakket med tøris og skal forblive frosne indtil analysetidspunkt.  
Ved modtagelse kontrolleres at alle prøver er frosne, hvis ikke kontaktes DEKS.  
Prøverne skal opbevares ved -80 °C indtil analyse.

## Deadlines

Du vil på åbningsdagen for analyseperioden modtage en adviseringsmail.

	1. indberetning	2. indberetning	3. indberetning	4. indberetning
<b>Prøvenumre</b>	D01, E01, F01, G01	D02, E02, F02, G02	D03, E03, F03, G03	D04, E04, F04, G04
<b>Analyseperiode og åben for indberetning</b>	26.02.24 – 04.03.24	27.05.24 – 03.06.24	23.09.24 – 30.09.24	25.11.24 – 02.12.24

## Instruktion før måling

Kontrolprøverne optøs ved stuetemperatur og vendes forsigtigt 5 gange forud for analyse.  
Der analyseres i enkelt eller dobbeltbestemmelse. Ved analyse med dobbeltbestemmelse indberettes gennemsnittet.  
Analyseres med dobbeltbestemmelse bliver vurderingen af bias mellem laboratorier mere sikker.

## Resultatindberetning

Der indberettes elektronisk via [DEKSONline](#).

**OBS: Lotnummer**, der begynder med 0x0 kan ikke benyttes, da det af databasen opfattes som et hexadecimalt tal. Anvend bogstavet O i stedet for tallet 0.

## Spørgsmål

Eventuelle spørgsmål rettes til

- Bioanalytiker Lisbeth Nielsen ☎ 38 63 44 10 ✉ [lisbeth.nielsen@deks.dk](mailto:lisbeth.nielsen@deks.dk)
- Kvalitetskoordinator Karin Heidemann ☎ 38 63 44 16 ✉ [karin.heidemann@deks.dk](mailto:karin.heidemann@deks.dk)

Med venlig hilsen Lisbeth Nielsen, DEKS